




**Datenblatt**  
**Class5 Steam Integrator**

Fassung vom Juli 2019  
Seite 1 von 2

	<b>Medi Pack Class5 Steam Integrator (EN ISO 11140-1) Sterilisationsprodukt für die Chargenkontrolle der Dampfsterilisation</b>
<b>PRODUKTBEZEICHNUNG:</b>	Chemischer Indikator für die Messung der drei kritischen Parameter (Zeit, Temperatur und Sattedampf) bei der Dampfsterilisation von medizinischen Instrumenten im medizinischen, dentalen oder veterinären Gebrauch.
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG:</b>	Typ 5 Integrator System erfüllt AAMI DIN ISO 11140-1, Type 5 Material: 250 g Ivory Karton, Front laminiert Text und Logo: grün und schwarz Indikator 1: von pink zu schwarz Indikator 2: von blau zu pink Indikator 3: von blau zu pink Artikel-Nr.: 600405
<b>LAGERUNG:</b>	Weder Licht noch Hitze aussetzen. Lagerung in verschlossenen Packungen bei Raumtemperatur (15° C bis 40° C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in unmittelbarer Nähe von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln lagern.
<b>INFORMATION:</b>	Der Gebrauch von chemischen Indikatoren ist zum Monitoring bei verpacktem Sterilgut, Trays, Containern und Sterilisationsbeuteln wichtig. Chemische Indikatoren sollten innerhalb jeder Art von Verpackung benutzt werden, um sicherzustellen, dass in allen Verpackungen die gleichen Bedingungen beim Sterilisationsprozess vorhanden waren. Die Ladung in dem Autoklaven wird nur dann entnommen, wenn der pinke Indikatoranzeiger schwarz und der blaue Indikatoranzeiger pink umgeschlagen ist. Ist dies nicht der Fall, muss die Ladung im Autoklaven erneut sterilisiert werden.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

 <p>The logo for MEDI-PACK features a stylized blue 'M' composed of three overlapping shapes above the text 'MEDI-PACK' in green.</p>	<p><b>Datenblatt</b> <b>Class5 Steam Integrator</b></p>	<p>Fassung vom Juli 2019 Seite 2 von 2</p>
--	---	--

<p><b>INFORMATION:</b></p>	<p>Der stabile Indikatorstreifen lässt ein Anheften in der Dokumentation zu. Der Class 5 Steam Integrator behält seine Wirkung bei nicht geöffneter Packung 5 Jahre nach Herstellungsdatum, wenn die Packung nach den Empfehlungen gelagert wird.</p>
----------------------------	---

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Lieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.